

# BIO TEST

Your reliable home test kits series

## ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (แบบปัสสาวะผ่าน)


รหัสผลิตภัณฑ์ 9 555 223 208 012

สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายและใช้ในการทดสอบด้วยตนเอง  
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 30°C

### วัตถุประสงค์การใช้งาน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบไหลผ่าน (ปัสสาวะ) ของ BIOTEST เป็นวิธีการตรวจสอบเชิงโครมาโตกราฟีอย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจสอบฮอร์โมน human chorionic gonadotropin (hCG) ในปัสสาวะในเชิงปริมาณเพื่อช่วยตรวจสอบการตั้งครรภ์ในช่วงต้น

### วิธีการใช้งาน

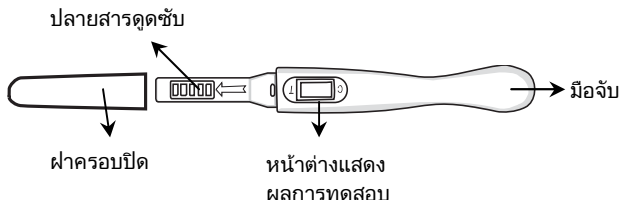

#### ขั้นตอนที่ 1:

- อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนใช้งาน
- แนะนำให้ทำการทดสอบกับปัสสาวะแรกในตอนเช้า เนื่องจากปัสสาวะแรกในตอนเช้าจะมีปริมาณ hCG สูงสุด
- ตรวจสอบว่าถุงมีการปิดสนิท จากนั้นแกะถุงออก

#### ขั้นตอนที่ 2:

- ถอดฝาครอบปิดออกจากอุปกรณ์

#### ขั้นตอนที่ 3:

- ถืออุปกรณ์ตรงมือจับโดยให้ปลายที่มีสารดูดซับชี้ลงด้านล่าง
- ให้ปัสสาวะผ่านอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนปลายทั้งหมดของอุปกรณ์เปียก (หมายเหตุ: ท่านสามารถปัสสาวะลงในภาชนะที่สะอาดและแห้งได้ จากนั้นจุ่มเฉพาะส่วนปลายที่มีสารดูดซับของชุดทดสอบแบบปัสสาวะผ่านลงในปัสสาวะอย่างน้อย 10 วินาที)
- นำอุปกรณ์ออก (ท่านอาจปิดฝาครอบกลับ - การปิดฝาครอบกลับไม่ส่งผลต่อผลการทดสอบ)

#### ขั้นตอนที่ 4:

- วางอุปกรณ์บนพื้นเรียบโดยหันด้านหน้าต่างแสดงผลขึ้น ท่านจะสังเกตเห็นสีชมพูกำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าต่างแสดงผลการทดสอบ เป็นการบ่งบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาการทดสอบขึ้น

#### ขั้นตอนที่ 5:

- อ่านผลการทดสอบภายใน 5 นาที โดยจะมีแถบสี (เส้น) ปรากฏขึ้นที่หน้าต่างแสดงผลการทดสอบ
- ไม่ควรอ่านผลการทดสอบหลังจากผ่านไป 5 นาที

### วิธีการอ่านผลการทดสอบ



#### ตั้งครรภ์

ผลการทดสอบเป็นบวก: 2 แถบ

เส้นสีแดง 2 เส้นปรากฏบนหน้าต่างแสดงผลหมายความว่าท่านอาจมีการตั้งครรภ์ เส้นหนึ่งอาจจางกว่าอีกเส้นหนึ่ง ไม่มีความสอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบกับแพทย์เพื่อยืนยันถึงการตั้งครรภ์.



#### ไม่ตั้งครรภ์

ผลการทดสอบเป็นลบ: 1 แถบในบริเวณ (C)

เส้นสีแดง 1 เส้นปรากฏในบริเวณควบคุม (C) หมายความว่าท่านอาจไม่มีการตั้งครรภ์



#### ผลการทดสอบเป็นโมฆะ

ผลการทดสอบเป็นโมฆะ: ไม่มีแถบ หรือมี 1 แถบในบริเวณ (T)



ผลการทดสอบเป็นโมฆะหากไม่มีเส้นสีแดงปรากฏในบริเวณควบคุม (C) แม้ว่าจะมีเส้นปรากฏในบริเวณทดสอบ (T) ท่านควรดำเนินการทดสอบซ้ำด้วยชุดการทดสอบใหม่

### ข้อควรระวังและคำเตือน

- ห้ามใช้งานชุดทดสอบหลังจากวันหมดอายุ
- หากบรรจุภัณฑ์ปิดไม่สนิทห้ามใช้งานชุดทดสอบ
- การทดสอบควรมีการดำเนินการในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ใช้อุปกรณ์ในการทดสอบทันทีหลังจากที่ทำการเปิด
- ห้ามสัมผัสหน้าต่างแสดงผลการทดสอบ เพราะจะส่งผลต่อการทดสอบและอาจก่อให้เกิดอันตรายส่วนบุคคล
- ในถุงจะมีซองสารดูดความชื้นเอาไว้ดูดความชื้น ห้ามเปิดซองนี้ ตั้งไปพร้อมกับส่วนที่เหลือของชุดทดสอบ
- เมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้น ให้ห่อทุกอย่างที่ใส่แล้วไว้ในถุงพลาสติกและทิ้งลงถังขยะ แล้วล้างมืออย่างเหมาะสม

### สิ่งที่บรรจุมา

- อุปกรณ์ทดสอบ
- สารดูดความชื้น
- ใบแทรกของบรรจุภัณฑ์

### คำอธิบายผลการทดสอบ

ผลการทดสอบเป็นบวกบ่งชี้ว่าท่านมีฮอร์โมน hCG (ฮอร์โมนการตั้งครรภ์) ที่ความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 25mIU/ml ซึ่งเป็นช่วงความไวของอุปกรณ์ของเรา และอาจถือได้ว่าท่านมีการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับการฝากครรภ์ได้ดีที่สุด หากท่านเข้ารับการรักษาโรคควรแจ้งแพทย์ของท่านทันที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการรักษามีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์

ผลการทดสอบเป็นลบหมายความว่าไม่มีการตรวจพบฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์ หากผ่านไป 1 สัปดาห์ และประจำเดือนของท่านยังคงไม่มา ควรทำการทดสอบใหม่หลังจากผ่านไป 2 วัน หากผลการทดสอบยังคงเป็นลบ มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ท่านจะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การที่ประจำเดือนไม่มามีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จึงควรไปพบแพทย์ทันที

หากรอบประจำเดือนของท่านไม่ปกติ เป็นการยากที่จะทราบได้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ หากผลการทดสอบของท่านแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์ และประจำเดือนยังไม่มาหลังจากผ่านไป 2-3 วัน ท่านอาจมีการคำนวณรอบประจำเดือนผิดพลาด และควรใช้ชุดทดสอบที่ 2 หลังจากผ่านไป 2 วัน

### ข้อจำกัดของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบไม่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ มันจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องเท่านั้น แม้ว่าชุดทดสอบจะมีความแม่นยำสูงในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ แต่ก็อาจให้ผลที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีความเป็นไปได้บ้างเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบกับแพทย์ของท่านหากว่าผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหรือไม่สอดคล้อง นอกจากนี้ภาวะสุขภาพร่างกายบางอย่างยังเป็นสาเหตุทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดหรือผิดพลาด

### ข้อสงสัยและคำตอบ

Q. ชุดทดสอบทำงานอย่างไร?

A. เมื่อผู้หญิงมีการตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนเฉพาะในการตั้งครรภ์ที่เรียกว่า hCG (human Chorionic Gonadotropin) ฮอร์โมนนี้จะมีการปรากฏในปัสสาวะในช่วงวันแรกๆ ที่ประจำเดือนขาด ผลการทดสอบที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าปัสสาวะของท่านมีฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านตั้งครรภ์ ผลการทดสอบที่เป็นลบหมายความว่าไม่มีการตรวจพบฮอร์โมน hCG และอาจถือได้ว่าท่านไม่ได้ตั้งครรภ์

Q. หากมีเส้นสีแดงปรากฏขึ้น 2 เส้น แต่เส้นหนึ่งจางกว่าอีกเส้นหนึ่งมาก จะตั้งครรภ์หรือไม่?

A. อาจถือได้ว่าท่านมีการตั้งครรภ์

Q. ผลการทดสอบจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไป?

A. ผลการทดสอบที่เป็นบวกอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทำการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง แต่ผลการทดสอบที่เป็นลบจะไม่สามารถอ่านได้อีกหลังจากผ่านไป 10 นาที

Q. ควรทำอย่างไรหากผลการทดสอบเป็นลบ แต่ยังคงคิดว่าตนเองตั้งครรภ์?

A. ท่านอาจมีการคำนวณรอบประจำเดือนผิดพลาด หากในอีกสัปดาห์ประจำเดือนยังคงไม่มาให้ทำการทดสอบซ้ำ และหากผลการทดสอบยังคงเป็นลบและประจำเดือนของท่านยังคงไม่มาควรไปพบแพทย์

Q. หากยังคงสงสัยเกี่ยวกับเส้นสีชมพูอีกเส้นในบริเวณ "T" ควรทำอย่างไร?

A. แนะนำให้ท่านทำการทดสอบใหม่ในอีก 3 วันถัดมาโดยใช้ชุดทดสอบใหม่

IFU-BT-HCG-M.v3.2014

ผลิตโดย Atlas Medical

William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WX, UK

BIOTEST เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bio-gro Sdn Bhd.

[www.bio-test.info](http://www.bio-test.info)